

Durchführung des SARS-CoV-2 Antigen- Selbsttests



Vorbereitung



Nase putzen



Hände waschen





**Papiertuch
bereitlegen**

Schachtel auspacken




Teströhrchen auspacken und aufstellen

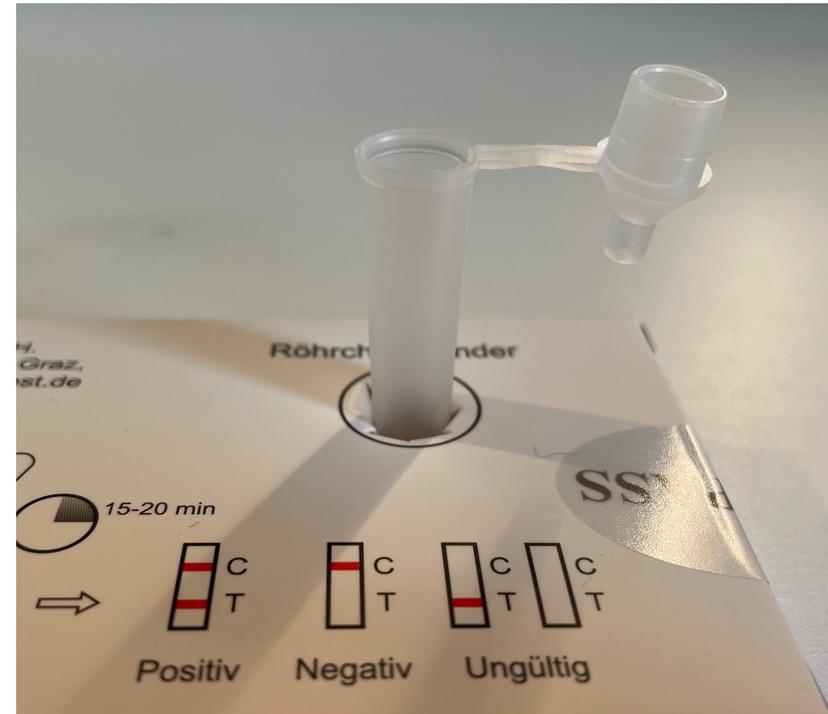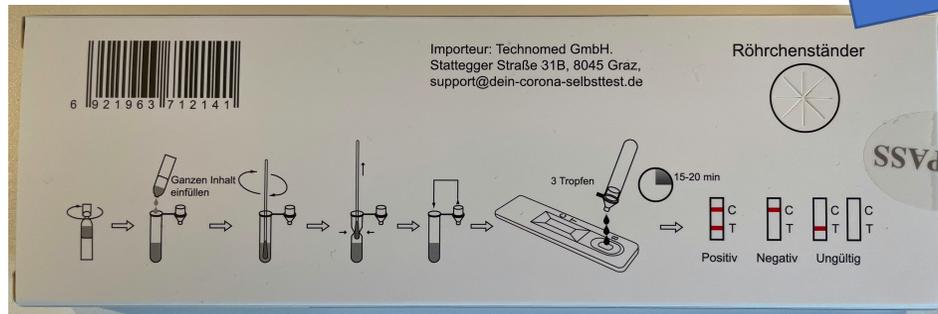

Teströhrchen befüllen

Extraktionslösung
vorsichtig aufdrehen

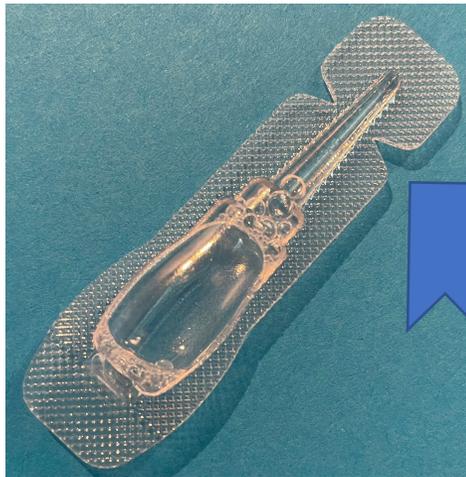


Flüssigkeit in das
Teströhrchen füllen




Tupfer entnehmen

Verpackung vorsichtig öffnen

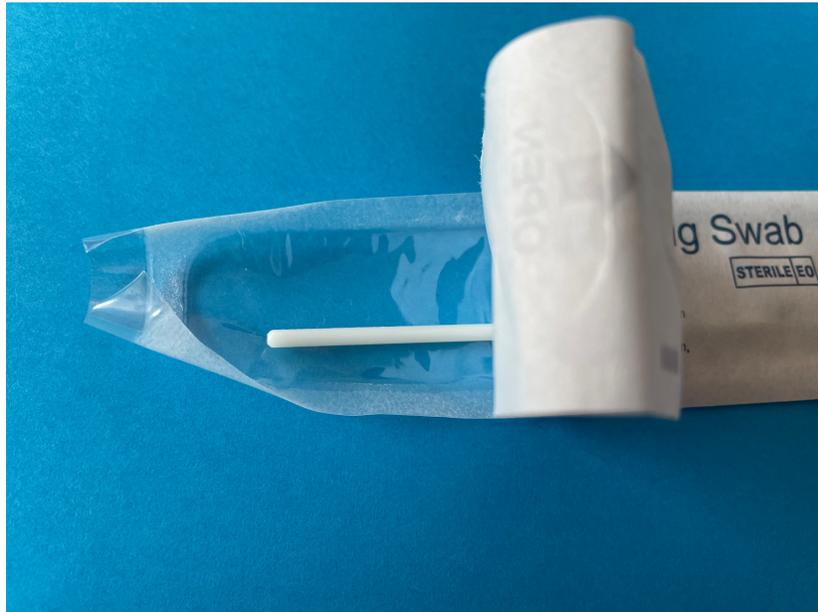


Tupfer entnehmen

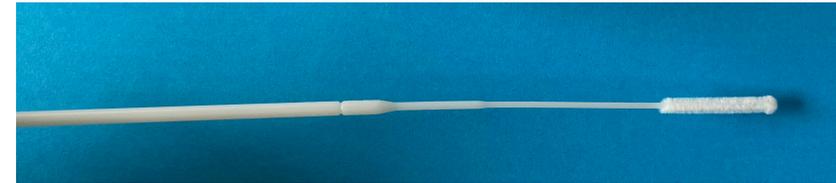

Achtung: Spitze nicht berühren!

Probe nehmen

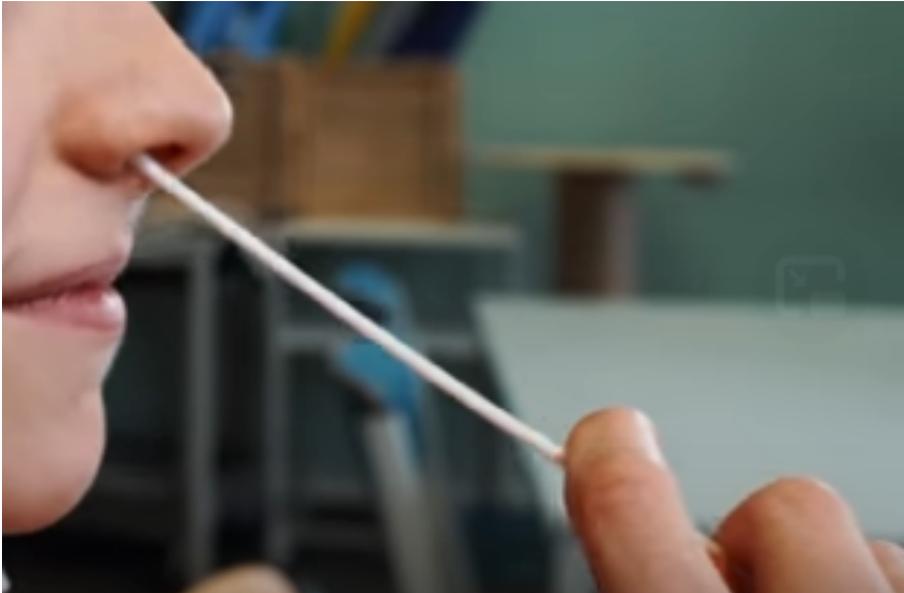

- Tupfer ca. 2,5 cm in Nasenloch einführen
- an der Schleimhaut drehen
- ein paar Sekunden in der Nase halten
- im anderen Nasenloch wiederholen



Probe sichern



Tupferspitze
im
Teströhrchen
3 - 5 mal
drehen

Tupfer ca. 1 min
in Röhrchen
stehen lassen




Abstrich sichern

Röhrchen
zusammendrücken




Tupfer herausziehen

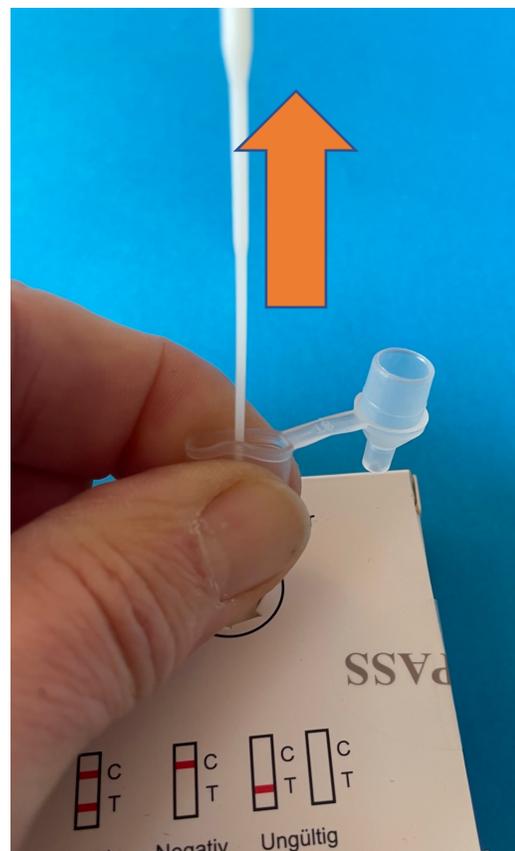

Benutzten Tupfer
auf dem
Papiertuch ablegen

Tropfspitze aufsetzen

Röhrchen mit der Tropfspitze verschließen

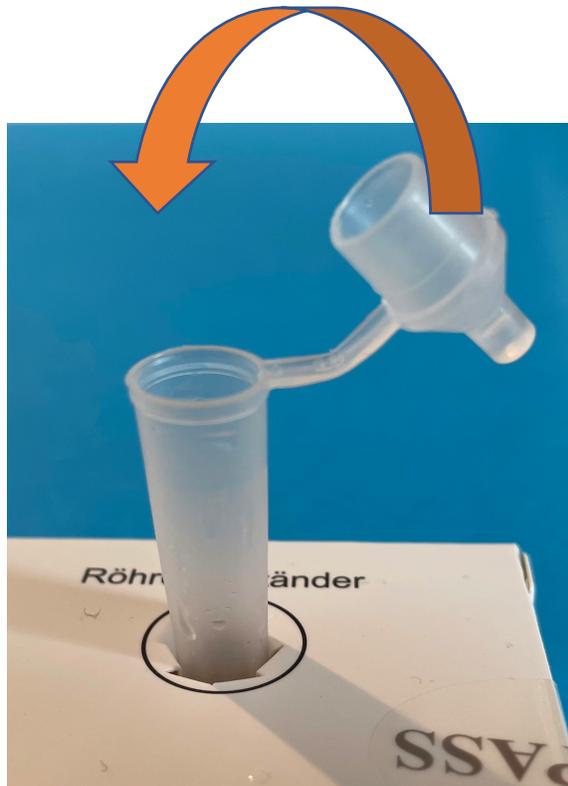

Testkassette vorbereiten




Beutel aufreißen



Testkassette
bereitlegen

Tropfen aufbringen

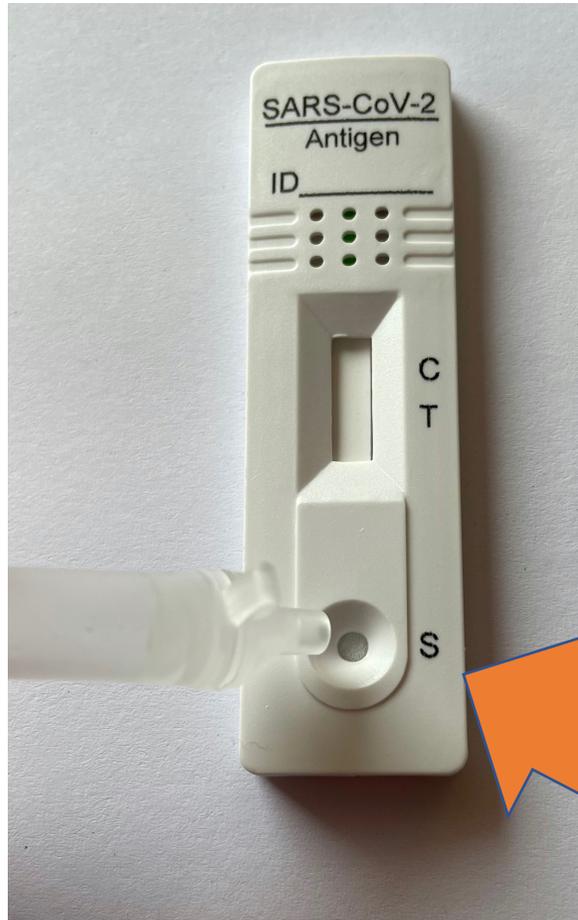

Teströhrchen aus dem
Aufsteller nehmen

3 Tropfen aus dem Röhrchen
auf das Testfeld S geben

Wartezeit 15 – 20 min



Handy-Timer auf
15 min einstellen
und starten



Testkassette ruhig
liegen lassen
und warten




nach 15 min
das Ergebnis ablesen

Ping[®]

Negativ?

Ergebnis ablesen


negativ

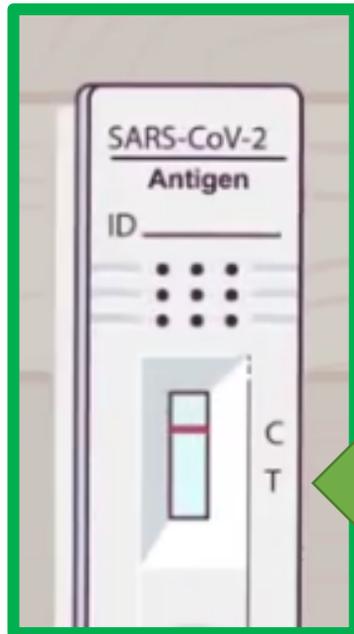

Kein Strich bei T

Ablauf:

- 1.) Ausfüllen des Nachweises
- 2.) Testkassette in die Transportbox packen
- 3.) zur Schule kommen

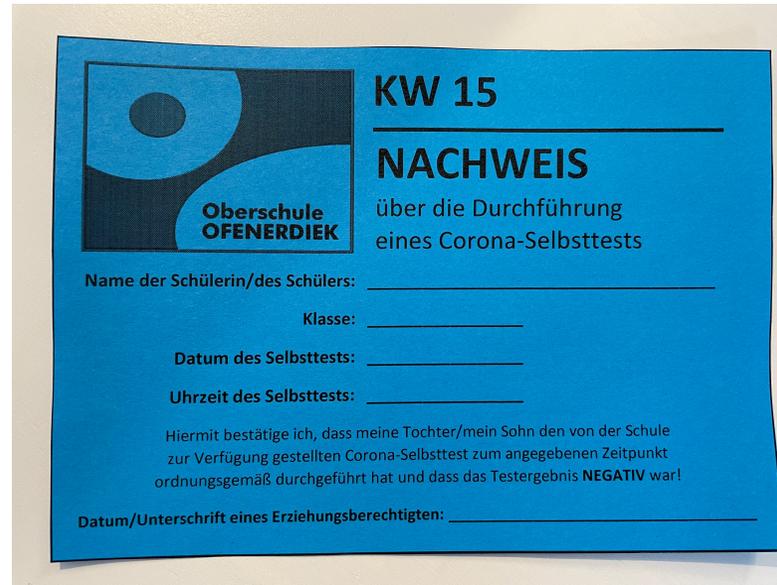

KW 15

NACHWEIS
über die Durchführung
eines Corona-Selbsttests

Name der Schülerin/des Schülers: _____

Klasse: _____

Datum des Selbsttests: _____


Uhrzeit des Selbsttests: _____

Hiermit bestätige ich, dass meine Tochter/mein Sohn den von der Schule zur Verfügung gestellten Corona-Selbsttest zum angegebenen Zeitpunkt ordnungsgemäß durchgeführt hat und dass das Testergebnis **NEGATIV** war!

Datum/Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _____

Ergebnis ablesen

Positiv

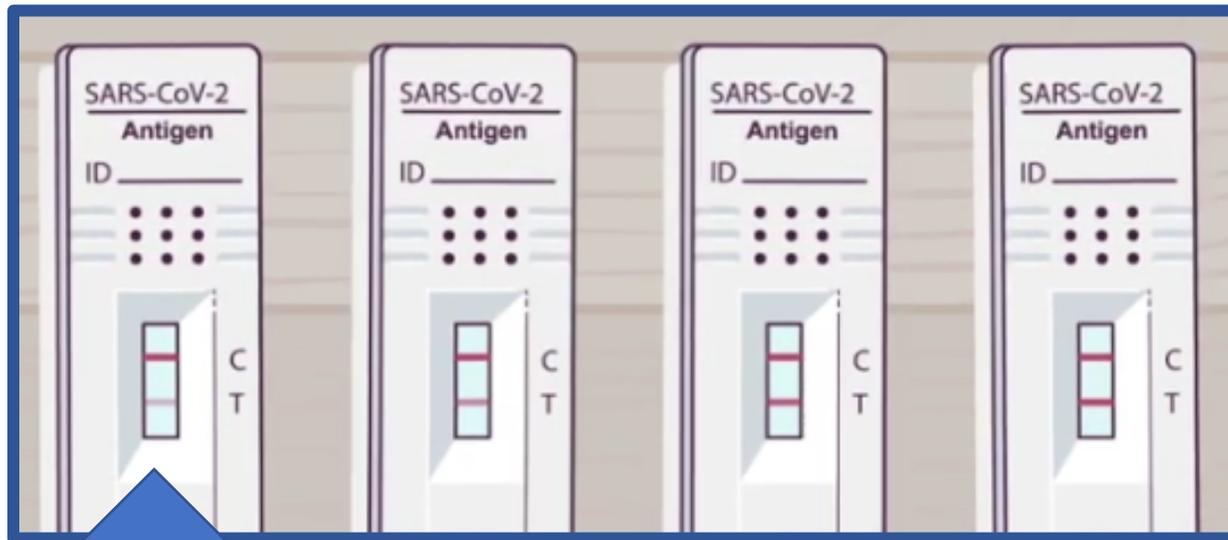

Farbiger Strich bei T

Ablauf:

1.) Schule informieren
Tel. 960920




2.) Testkassette in die
Transportbox packen

3.) Zum Arzt fahren und einen
PCR-Test durchführen lassen

4.) Bis zum Testergebnis
in Quarantäne bleiben

Ergebnis ablesen

ungültig

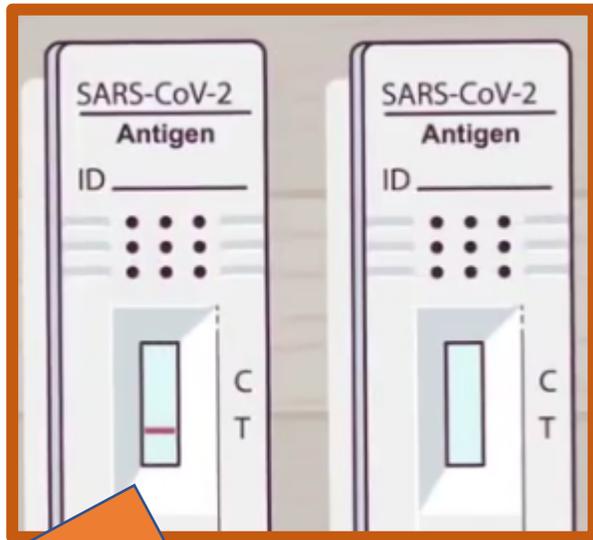

Es erscheint nur ein Strich bei T.
Es erscheinen keine Striche.

Was tun?

Rufe bitte in der Schule an!
Tel. 960920



Entsorgung



Entsorge den
benutzen
Schnelltest
im Restmüll



Für weitere Informationen kannst du dich auf der Homepage des Testherstellers informieren:
https://dein-corona-selbsttest.de/?gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_13A0A3rNBFi4H8zsCI6DAWpS1bmbaHCSe4fJjORdhOPXprtNYIT8aAqoXEALw_wcB